

**JOBST®  
COMPRESSIE-  
PRODUCTEN  
VOOR DE  
INITIËLE  
FASE**

NIETS HOUDT JE TEGEN





## INHOUD


---

- 4 **JOBST® COMPRILAN®**
- 6 **JOBST® COMPRILAN® COMPRESSIEBOX**
- 8 **JOBST® COMPRILAN® TOTAL**
- 10 **JOBST® COMPRI2**
- 12 **JOBST® ULCERCARE**
- 16 **JOBST® FARROWWRAP® 4000**
- 18 **JOBST® GELOSTRETCH®**



JOBST®  
COMPRILAN®

## KORTEREK ZWACHTEL VOOR COMPRESSIETHERAPIE

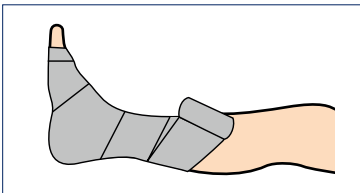

Een correct aangelegde korterek zwachtel geeft graduele compressie waardoor de spierpomp wordt ondersteund en de veneuze terugstroom wordt bevorderd. De zwachtel geeft een hoge werkdruk en een lagere rustdruk en kan daardoor dag en nacht worden gedragen. **Comprilan** is een korterek zwachtel die dag en nacht ondersteuning, verlichting en compressie biedt.

### INDICATIES VOOR COMPRESSIETHERAPIE MET KORTEREK ZWACHTELS

- Patiënten met spataderen, chronische veneuze insufficiëntie, diep veneuze trombose, thrombophlebitis (aderontsteking), ulcus cruris venosum.
- Na vaatoperaties (stripping) of het wegsputten (scleroseren) van spataderen.
- Patiënten met oedeem door flebologische en/of lymfatische aandoeningen.



## COMPRILAN®

- ✓ **Ademend** en gemaakt van **100% katoen**.
- ✓ **Duurzaam**: kan tot 10 keer opnieuw worden gebruikt en is wasbaar op 60 graden. De stof behoudt de therapeutische eigenschappen na sterilisatie in de autoclaaf. Niet geschikt om te strijken, bleken of drogen in de wasdroger.
- ✓ Heeft een **lengterek** van 90%.

## CONTRA-INDICATIES

- Vergeevorderde insufficiëntie van de perifere slagaderen
- (Onbehandeld) hartfalen
- Aderontstekingen
- Acute ontsteking van de diepe beenaderen

## ASSORTIMENT


| Omschrijving  | Artikelnummer | Z-index nummer | Inhoud per doos | Inhoud verzendkarton |
|---|---------------|----------------|-----------------|----------------------|
| Comprilan 5 m x 6 cm  | 01026-00      | 12823066       | 1               | 40 x 5 (200)         |
| Comprilan 5 m x 8 cm  | 01027-00      | 12823074       | 1               | 34 x 5 (170)         |
| Comprilan 5 m x 10 cm   | 01028-00      | 12823082       | 1               | 28 x 5 (140)         |
| Comprilan 5 m x 12 cm   | 01029-00      | 12823090       | 1               | 24 x 5 (120)         |
| <b>Dubbele zwachtel in verpakking ten behoeve van onderbeen</b> |               |                |                 |                      |
| Comprilan 5 m x 10 cm - per 2                                   | 01030-00      | 12823104       | 2               | 4 x 1 (4)            |
| <b>Basis zwachtelset ten behoeve van onderbeen</b>              |               |                |                 |                      |
| Comprilan Total   | 01233-02      | 15791785       | 1               | 4 x 1 (4)            |
| <b>Complete zwachtelset ten behoeve van onderbeen</b>           |               |                |                 |                      |
| Comprilan Compressiebox   | 01233-00      | 14566273       | 1               | 4 x 1 (4)            |



# JOBST® COMPRILAN® COMPRESSIEBOX



## EEN COMPLETE SET MATERIALEN VOOR AMBULANTE COMPRESSIETHERAPIE

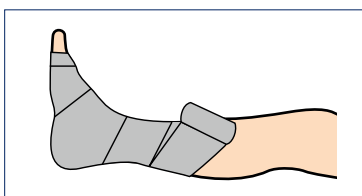

Wanneer u start met compressietherapie is het belangrijk om de de juiste materialen te gebruiken, die passen bij de specifieke behoeften van de patiënt met oedeem. Huidbescherming en het voorkomen van drukletsels zijn essentieel voor het slagen van de therapie. De **Comprilan Compressiebox** is een complete set die naast de benodigde materialen ook handige extra's bevat zoals een meetlint en een instructiekaartje.

### DE PATIËNT

- Patiënten met oedeem door flebologische en/of lymfatische aandoeningen.
- Patiënten met spataderen, chronische veneuze insufficiëntie, diep veneuze trombose, thrombophlebitis (aderontsteking t.g.v. trombose), ulcus cruris venosum.
- Na vaatoperaties (stripping) of het wegsputten (scleroseren) van spataderen.



## DE COMPRILAN® COMPRESSIEBOX BEVAT DE VOLGENDE MATERIALEN:

- ✓ 4 rollen Comprilan 10 cm x 5 m
- ✓ 1 rol Tensofast double stretch 7,5 cm x 1 m
- ✓ 2 rollen Soffban 10 cm x 2,7 m
- ✓ 1 rol Leukopor dispenser 2,5 cm x 9,2 m
- ✓ 1 meetlint
- ✓ 1 zwachtelinstructiekaart
- ✓ 1 receptenblok


## ASSORTIMENT

| Omschrijving            | Artikelnummer | Z-index nummer | Inhoud per doos | Inhoud verzendkarton |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|
| Comprilan Compressiebox | 01233-00      | 14566273       | 1               | 4 x 1 (4)            |



# JOBST® COMPRILAN® TOTAL

## BASISSET MATERIALEN VOOR AMBULANTE COMPRESSIETHERAPIE

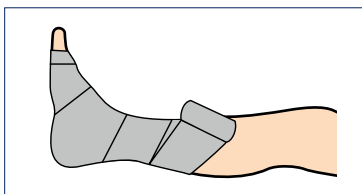

Zwachtelen is vaak een onderdeel van het traject in de initiële fase voor **patiënten met flebologische en lymfatische aandoeningen**. Om een zwachtel aan te kunnen leggen en een patiënt te behandelen zijn er vaak meerdere producten nodig. **Comprilan total** bestaat uit een **complete kit** van korterek zwachtels en polstermaterialen zodat u direct kunt starten met de behandeling.

### DE PATIËNT

- Patiënten met spataderen, chronische veneuze insufficiëntie, diep veneuze trombose, thrombophlebitis (aderontsteking t.g.v. trombose), ulcus cruris venosum.
- Na vaatoperaties (stripping) of het wegsprengen (scleroseren) van spataderen.
- Patiënten met oedeem door flebologische en/of lymfatische aandoeningen.





## COMPRILAN® TOTAL BEVAT DE VOLGENDE MATERIALEN:

- ✓ 4 rollen Comprilan 10 cm x 5 m
- ✓ 1 rol Leukopor 2,5 cm x 5 m
- ✓ 2 rollen Tensofast double stretch 7,5 cm x 1 m
- ✓ 1 rol Soffban 10 cm x 2,7 m
- ✓ 1 zwachtelinstructiekaart

Met 1 Comprilan total kan 1 been worden behandeld.


## ASSORTIMENT

| Omschrijving    | Artikelnummer | Z-index nummer | Inhoud per doos | Inhoud verzendkarton |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|
| Comprilan Total | 01233-02      | 15791785       | 1               | 4 x 1 (4)            |



# JOBST® COMPRI2

## 2-LAAGS COMPRESSIESYSTEEM VOOR COMPRESSIETHERAPIE

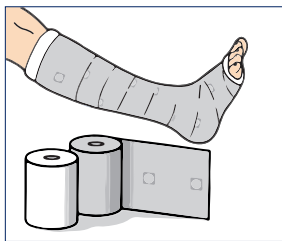

Een correct aangelegde korterek zwachtel geeft graduele compressie waardoor de spierpomp wordt ondersteund en de veneuze terugstroom wordt bevorderd. JOBST Compriz is ontworpen voor gemak tijdens de behandeling als compressie-therapie geïndiceerd is. Het 2-laags compressiesysteem kan tot 7 dagen compressie geven en dankzij de lage rustdruk en hoge werkdruk kunnen de zwachtels gedurende de **dag en nacht** blijven zitten.

### DE PATIËNT

- Patiënten met oedeem door flebologische en/of lymfatische aandoeningen.
- **JOBST Compriz lite (20-30 mmHg)** is vooral geschikt voor patiënten met een enkel-armindex hoger dan 0,5 en tot maximaal 0,8.
- **JOBST Compriz (40 mmHg)** is alleen geschikt als de enkel-armindex minimaal 0,8 is. Hoge compressiedrukken zijn gecontraïndiceerd bij arteriële aandoeningen (arteriële of voornamelijk arteriële ulcera of bestaande of vermoede arteriële aandoeningen).
- Het wordt aanbevolen om ook een teendruk meting te doen.

## JOBST® COMPRI2



- ✓ De eerste zwachtel is gemaakt van zacht materiaal dat scheurbaar en licht rekbaar is. Ook heeft het een anti-sliplaag voor **extra grip**. Gemakkelijk aan te leggen, ook rondom de enkel. Hierdoor worden **kwetsbare drukpunten beschermd**.
- ✓ De tweede laag is een korterek zwachtel met een **visuele indicator** die helpt om de aanbevolen therapeutische compressie te geven.
- ✓ Beschikbaar in 2 lengtematen en compressie-niveau's. JOBST Compri2 lite biedt **20-30mmHg** en heeft een lengterek van 75%. JOBST Compri2 biedt **40mmHg** en heeft een lengterek van 70%.

## CONTRA-INDICATIES

JOBST Compri2 kan niet worden toegepast bij patiënten die allergisch reageren op een van de volgende bestanddelen:

- Polsterverband: polyester
- Compressieverband: katoen, latexvrij synthetisch rubber
- Bij gevorderde diabetische micro-angiopathie, phlegmasia caerulea dolens en septische trombose, kan het compressiesysteem niet worden toegepast
- Het gebruik kan bij gevoelsstoornissen van de ledematen incidenteel tot problemen leiden.

## ASSORTIMENT

| Omschrijving                                   | Maat     | Artikelnummer | Z-index nummer | Inhoud per doos | Inhoud verzendkarton |
|--|----------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|
| JOBST Compri2 - 2-laags compressiesysteem      | 18-25 cm | 76271-00      | 16094379       | 1               | 10                   |
| JOBST Compri2 - 2-laags compressiesysteem      | 25-32 cm | 76271-01      | 16094387       | 1               | 10                   |
| JOBST Compri2 lite - 2-laags compressiesysteem | 18-25 cm | 76271-02      | 16094395       | 1               | 10                   |
| JOBST Compri2 lite - 2-laags compressiesysteem | 25-32 cm | 76271-03      | 16094409       | 1               | 10                   |



## COMPRESSIESYSTEEM VOOR DE BEHANDELING VAN EEN VENEUS ULCUS CRURIS

De meest voorkomende onderliggende oorzaak van een ulcus cruris venosum is veneuze insufficiëntie. De verstoorde bloedtoevoer naar het hart is voornamelijk het gevolg van slecht functionerende kleppen in het veneuze systeem. Wanneer de veneuze kleppen niet goed functioneren, wordt een constante druk van 40 mmHg\* of meer op de enkel aanbevolen om de terugstroom van het bloed naar het hart te ondersteunen.

JOBST UlcerCare wordt ingezet bij patiënten waarbij nog sprake is van een ulcus cruris venosum, maar het oedeem al (gedeeltelijk) verdreven is door middel van compressietherapie met zwachtels. Doordat het systeem uit 2 kousen bestaat kunnen deze elk met zo min mogelijk pijn en kans op huidbeschadiging worden aangetrokken. Zodra het ulcus genezen is en de huid minder kwetsbaar is voor wrijving, kan de overstap worden gemaakt naar een therapeutische elastische kous.

### DE PATIËNT

- Patiënten met een ulcus cruris venosum en stabiel of verdreven oedeem door flebologische en/of lymfatische aandoeningen.
- JOBST UlcerCare is alleen geschikt als de enkel-armindex minimaal 0,8 is. Hoge compressiedrukken zijn gecontraïndiceerd bij arteriële aandoeningen (arteriële of voornamelijk arteriële ulcera of bestaande of vermoede arteriële aandoeningen).
- Het wordt aanbevolen om ook een teendrukmeting te doen.



## JOBST® ULCERCARE

- Geeft de aanbevolen graduele compressie van 40 mmHG op de enkel uitgaande van een gemiddelde omvang.
- Biedt een hoge weerstand (stiffness) die bijdraagt aan het genezingsproces van het ulcus cruris.\*
- Ontworpen om gemakkelijk aan te trekken dankzij de zachte onderkous.
- Kan in combinatie met gewone schoenen en kleding worden gebruikt zodat de patiënt niet gehinderd wordt tijdens ADL en mobiliseren.

### JOBST® ULCERCARE ONDERKOUS (beschermende liner met gradueel aflopende compressie)

- ✓ Gemaakt van 79% nylon/polyamide, 16% spandex/elasthaan en 5% zijde. Bevat geen natuurrubber latex.
- ✓ Kan 24 uur per dag worden gedragen
- ✓ Heeft een **verstevigd hiel- en teenstuk**
- ✓ **Bevat zijde** om de huid gezond te houden
- ✓ Kan op 60 °C worden gewassen

### JOBST® ULCERCARE BOVENKOUS



- ✓ Gemaakt van 76% nylon/polyamide en 24% spandex/elasthaan. Bevat geen latex.
- ✓ Ontworpen om gemakkelijk over de onderkous aan te trekken en kan 16 uur per dag worden gedragen
- ✓ Heeft een **verstevigd hielstuk en een open teen**
- ✓ Kan op 40 °C worden gewassen

\* Beoogde nominale compressie voor een gemiddelde enkelomvang.

\*\* Rapport van de European Wound Management Association (EWMA), Understanding compression therapy, 2003.

## MAATOVERZICHT

Bepaal eerst de juiste maat alvorens te bestellen. Meet ter hoogte van de smalste omvang van de enkel en het dikste deel van de kuit. Vallen de gemeten maten niet in 1 kolom? Overweeg dan de inzet van JOBST Compriz2.

| Maat  | S       | M       | L       | XL      | XXL     | XXXL    | XXXXL   |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2  | 18 - 21 | 21 - 24 | 24 - 27 | 27 - 30 | 30 - 33 | 33 - 36 | 36 - 39 |
| 3  | 29 - 35 | 34 - 41 | 40 - 47 | 46 - 54 | 48 - 56 | 50 - 58 | 52 - 60 |

**JOBST UlcerCARE** is verkrijgbaar in 7 maten en 2 kleuren (beige en zwart).

Een **JOBST UlcerCARE** systeem bevat één bovenkous en twee onderkousen.

## ASSORTIMENT

| Omschrijving                     | Maat  | Kleur | Artikelnummer | Inhoud per doos | Inhoud verzendkarton | Z-index nummer | Memo-code |
|----------------------------------|-------|-------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------|
| UlcerCARE systeem zonder rits    | S     | beige | 73630-21      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630870       | ULCEKS    |
| UlcerCARE systeem zonder rits    | M     | beige | 73630-22      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630862       | ULCEKM    |
| UlcerCARE systeem zonder rits    | L     | beige | 73630-23      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630854       | ULCEKL    |
| UlcerCARE systeem zonder rits    | XL    | beige | 73630-24      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630889       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem zonder rits    | XXL   | beige | 73630-25      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630897       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem zonder rits    | XXXL  | beige | 73630-26      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630900       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem zonder rits    | XXXXL | beige | 73630-27      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630919       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem zonder rits    | S     | zwart | 73630-41      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630943       | ULCEKS    |
| UlcerCARE systeem zonder rits    | M     | zwart | 73630-42      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630935       | ULCEKM    |
| UlcerCARE systeem zonder rits    | L     | zwart | 73630-43      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630927       | ULCEKL    |
| UlcerCARE systeem zonder rits    | XL    | zwart | 73630-44      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630951       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem zonder rits    | XXL   | zwart | 73630-45      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630978       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem zonder rits    | XXXL  | zwart | 73630-46      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630986       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem zonder rits    | XXXXL | zwart | 73630-47      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630994       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem met linkerrits | S     | beige | 73631-21      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630560       | ULCEKS    |
| UlcerCARE systeem met linkerrits | M     | beige | 73631-22      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630552       | ULCEKM    |
| UlcerCARE systeem met linkerrits | L     | beige | 73631-23      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630544       | ULCEKL    |
| UlcerCARE systeem met linkerrits | XL    | beige | 73631-24      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630579       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem met linkerrits | XXL   | beige | 73631-25      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630587       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem met linkerrits | XXXL  | beige | 73631-26      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630595       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem met linkerrits | XXXXL | beige | 73631-27      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630609       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem met linkerrits | S     | zwart | 73631-41      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630633       | ULCEKS    |
| UlcerCARE systeem met linkerrits | M     | zwart | 73631-42      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630625       | ULCEKM    |
| UlcerCARE systeem met linkerrits | L     | zwart | 73631-43      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630617       | ULCEKL    |
| UlcerCARE systeem met linkerrits | XL    | zwart | 73631-44      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630641       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem met linkerrits | XXL   | zwart | 73631-45      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630668       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem met linkerrits | XXXL  | zwart | 73631-46      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630676       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem met linkerrits | XXXXL | zwart | 73631-47      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630684       | ULCEKX    |

## ASSORTIMENT

| Omschrijving                       | Maat  | Kleur | Artikelnummer | Inhoud per doos | Inhoud verzendkarton | Z-index nummer | Memo-code |
|------------------------------------|-------|-------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------|
| UlcerCARE systeem met rechterraits | S     | beige | 73631-61      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630714       | ULCEKS    |
| UlcerCARE systeem met rechterraits | M     | beige | 73631-62      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630706       | ULCEKM    |
| UlcerCARE systeem met rechterraits | L     | beige | 73631-63      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630692       | ULCEKL    |
| UlcerCARE systeem met rechterraits | XL    | beige | 73631-64      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630722       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem met rechterraits | XXL   | beige | 73631-65      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630730       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem met rechterraits | XXXL  | beige | 73631-66      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630749       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem met rechterraits | XXXXL | beige | 73631-67      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630757       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem met rechterraits | S     | zwart | 73631-71      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630781       | ULCEKS    |
| UlcerCARE systeem met rechterraits | M     | zwart | 73631-72      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630773       | ULCEKM    |
| UlcerCARE systeem met rechterraits | L     | zwart | 73631-73      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630765       | ULCEKL    |
| UlcerCARE systeem met rechterraits | XL    | zwart | 73631-74      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630803       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem met rechterraits | XXL   | zwart | 73631-75      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630811       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem met rechterraits | XXXL  | zwart | 73631-76      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630838       | ULCEKX    |
| UlcerCARE systeem met rechterraits | XXXXL | zwart | 73631-77      | 1               | 10 x 1 (10)          | 15630846       | ULCEKX    |
| UlcerCARE onderkous                | S     | wit   | 73632-21      | 3               | 10 x 1 (10)          | 15632261       | ULCEKS    |
| UlcerCARE onderkous                | M     | wit   | 73632-22      | 3               | 10 x 1 (10)          | 15632288       | ULCEKM    |
| UlcerCARE onderkous                | L     | wit   | 73632-23      | 3               | 10 x 1 (10)          | 15632296       | ULCEKL    |
| UlcerCARE onderkous                | XL    | wit   | 73632-24      | 3               | 10 x 1 (10)          | 15632318       | ULCEKX    |
| UlcerCARE onderkous                | XXL   | wit   | 73632-25      | 3               | 10 x 1 (10)          | 15632326       | ULCEKX    |
| UlcerCARE onderkous                | XXXL  | wit   | 73632-26      | 3               | 10 x 1 (10)          | 15632334       | ULCEKX    |
| UlcerCARE onderkous                | XXXXL | wit   | 73632-27      | 3               | 10 x 1 (10)          | 15632342       | ULCEKX    |

# JOBST® FARROWWRAP® 4000



## COMPLEET KORTEREK KLITTENBANDSYSTEEM

Een compleet korterek klittenbandsysteem voor patiënten met mild tot matig oedeem. JOBST FarrowWrap 4000 bestaat uit een FarrowHybrid compressiekous die druk geeft op de voet en de enkel, gecombineerd met een klittenbandverband voor het onderbeen.

- Hoog gebruiksgemak door de geïntegreerde sleeve
- De 4 banden zijn makkelijk aan te leggen en eenvoudig op spanning te brengen
- Faciliteert mobiliteit, doordat het dragen van schoenen mogelijk is en bevordert daarmee het effect van de voetspierpomp

### Voor elke indicatie de juiste keuze

#### VENEUS OEDEEM

Mild

Matig

Ernstig

FarrowWrap 4000  
30 - 40 mmHg

FarrowWrap STRONG  
30 - 40 mmHg

#### LYMFOEDEEM

Mild

Matig\*

Ernstig

FarrowWrap LITE  
20 - 30 mmHg

FarrowWrap STRONG  
30 - 40 mmHg

\*Kies bij diepe huidplooien voor FW Strong



## TIPS

- Wanneer er sprake is van **veel oedeem in de voorvoet** door bijvoorbeeld immobiliteit, combineer het **FarrowWrap 4000** verband dan met het dragen van stevige schoenen, bij voorkeur met veters.
- Wanneer de **omvang van de kuit groter is dan 60 cm**, kunt u beter kiezen voor een **FarrowWrap Strong**.
- FarrowWrap 4000 kan ook worden gecombineerd met de FarrowWrap Lite onderbeenverlenger. Deze brengt u (na sluiten van de banden) met minimaal 50% overlap aan over de bovenste band van het FarrowWrap 4000 verband.

## AANTREKINSTRUCTIE



## KLEUR




beige

## COMPRESSIE

30-40 mmHg

## MAATTABEL

| Meetpunt (in cm) |              | XS    | S     | M     | L     |
|------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Ⓒ                | Omvang kuit  | 25-38 | 32-48 | 37-56 | 43-60 |
| Ⓑ                | Omvang enkel | 17-23 | 19-28 | 25-37 | 29-43 |
| I Ⓑ - Ⓓ          | Normaal      | 30-33 | 30-33 | 30-33 | 30-33 |
| I Ⓑ - Ⓓ          | Lang         | 34-37 | 34-37 | 34-37 | 34-37 |

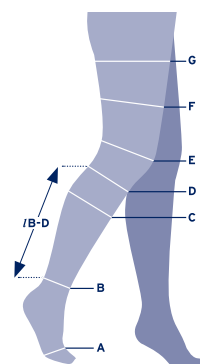

## BESTELINFORMATIE

| JOBST® FarrowWrap 4000 onderbeenverband | Artikelnummer | Z-index nummer | Inhoud               |
|---|---------------|----------------|----------------------|
| Normaal XS                              | 76661-00      | 16870964       | 1 stuk incl. 1 liner |
| Normaal S                               | 76661-01      | 16870980       | 1 stuk incl. 1 liner |
| Normaal M                               | 76661-02      | 16870999       | 1 stuk incl. 1 liner |
| Normaal L                               | 76661-03      | 16871006       | 1 stuk incl. 1 liner |
| Lang XS                                 | 76661-04      | 16871022       | 1 stuk incl. 1 liner |
| Lang S                                  | 76661-05      | 16871030       | 1 stuk incl. 1 liner |
| Lang M                                  | 76661-06      | 16871049       | 1 stuk incl. 1 liner |
| Lang L                                  | 76661-07      | 16871057       | 1 stuk incl. 1 liner |

# JOBST® GELOSTRETCH®



**ZINKGEL-ZWACHTEL MET ZEER HOGE WERKDRUK EN ZEER LAGE RUSTDRUK. JOBST GELOSTRETCH IS MAKKELIJK AAN TE LEGGEN.**

## EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Gelostretch koppelt moderne materiaaleigenschappen en praktische voordelen aan het therapeutische effect van het traditionele zinklijmverband. Het dragermateriaal is samengesteld uit natuurlijke materialen.

Omdat het geen elastische componenten bevat, kan Gelostretch zelfs bij moeilijke anatomische vormen met doorlopende zwachteltoeren worden aangelegd, zonder dat er plooien of insnoeringen ontstaan.

Gelostretch hoeft niet in- of afgeknipt te worden tijdens het aanbrengen. Omdat Gelostretch met cellulose is geïmpregneerd in plaats van gelatine, zoals bij de conventionele zinklijm-zwachtels, is Gelostretch perfect modelleerbaar. Bovendien droogt het verband snel. Omdat Gelostretch zinkgel niet afgeeft, drupt of aan de handen plakt, is het verband vlekkeloos aan te leggen. Na het drogen is de zwachtel bijzonder duurzaam.

Het dragermateriaal bestaat uit 76% viscose en 24% katoen. De zinkgel is op basis van cellulose. Gelostretch mag niet boven de 25 graden celsius worden bewaard en kan niet hergebruikt worden.

## TOEPASSINGEN

- Patiënten met oedeem door flebologische en/of lymfatische aandoeningen.
- Voor patiënten met eczeem kan JOBST Gelostretch verzachtend en verkoelend werken.

## CONTRA-INDICATIES

- vergevorderde insufficiëntie van de perifere slagaderen EAI < 0,5
- overgevoeligheid voor zink

## ASSORTIMENT

| Gelostretch              | Artikelnummer | Inhoud detailverpakking | Inhoud verzendkarton | Z-index nummer | Memo-code |
|--------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Gelostretch 10 cm x 10 m | 45297-00      | 10                      | 4 x 10 (40)          | 13957074       | GELOW1    |



## DAAROM JOBST®

---

Dankzij meer dan **65 jaar** ervaring weet JOBST als geen ander waar mensen met veneuze en lymfatische aandoeningen behoefte aan hebben. Daarom vinden professionals binnen het brede JOBST-assortiment voor iedere unieke cliënt een passende compressie-oplossing. Met úw expertise en de producten & services van JOBST maken we samen het leven van elke cliënt lichter: **een leven vol zelfvertrouwen en zonder compromissen als het gaat om comfort & kwaliteit.**



JOBST®,  
an Essity brand

09/2024

Essity Netherlands BV  
Arnhemse Bovenweg 120  
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700  
jobst.cs.nl@essity.com  
www.jobst.nl