


# JOBST® COMPRI2

## 2-LAAGS COMPRESSIESYSTEEM VOOR COMPRESSIETHERAPIE

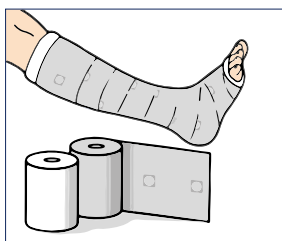

Een correct aangelegde korterek zwachtel geeft graduele compressie waardoor de spierpomp wordt ondersteund en de veneuze terugstroom wordt bevorderd. JOBST Compri2 is ontworpen voor gemak tijdens de behandeling als compressie-therapie geïndiceerd is. Het 2-laags compressiesysteem kan tot 7 dagen compressie geven en dankzij de lage rustdruk en hoge werkdruk kunnen de zwachtels gedurende de **dag en nacht** blijven zitten.

### DE PATIËNT

- Patiënten met oedeem door flebologische en/of lymfatische aandoeningen.
- **JOBST Compri2 lite (20-30 mmHg)** is vooral geschikt voor patiënten met een enkel-armindex hoger dan 0,5 en tot maximaal 0,8.
- **JOBST Compri2 (40 mmHg)** is alleen geschikt als de enkel-armindex minimaal 0,8 is. Hoge compressiedrukken zijn gecontraïndiceerd bij arteriële aandoeningen (arteriële of voornamelijk arteriële ulcera of bestaande of vermoede arteriële aandoeningen).
- Het wordt aanbevolen om ook een teendruk meting te doen.

## JOBST® COMPRI2



- ✓ De eerste zwachtel is gemaakt van zacht materiaal dat scheurbaar en licht rekbaar is. Ook heeft het een anti-sliplaag voor **extra grip**. Gemakkelijk aan te leggen, ook rondom de enkel. Hierdoor worden **kwetsbare drukpunten beschermd**.
- ✓ De tweede laag is een korterek zwachtel met een **visuele indicator** die helpt om de aanbevolen therapeutische compressie te geven.
- ✓ Beschikbaar in 2 lengtematen en compressie-niveau's. JOBST Compriz lite biedt **20-30mmHg** en heeft een lengterek van 75%. JOBST Compriz2 biedt **40mmHg** en heeft een lengterek van 70%.

## CONTRA-INDICATIES

JOBST Compriz2 kan niet worden toegepast bij patiënten die allergisch reageren op een van de volgende bestanddelen:

- Polsterverband: polyester
- Compressieverband: katoen, latexvrij synthetisch rubber
- Bij gevorderde diabetische micro-angiopathie, phlegmasia caerulea dolens en septische trombose, kan het compressiesysteem niet worden toegepast
- Het gebruik kan bij gevoelsstoornissen van de ledematen incidenteel tot problemen leiden.

## ASSORTIMENT

Omschrijving	Maat	Artikel-nummer	Z-index nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
JOBST Compriz2 - 2-laags compressiesysteem	18-25 cm	76271-00	16094379	1	10
JOBST Compriz2 - 2-laags compressiesysteem	25-32 cm	76271-01	16094387	1	10
JOBST Compriz2 lite - 2-laags compressiesysteem	18-25 cm	76271-02	16094395	1	10
JOBST Compriz2 lite - 2-laags compressiesysteem	25-32 cm	76271-03	16094409	1	10