

# NACHT- COMPRESSIE VOOR COMPLEXE CASUÏSTIEK

JOBST® JoViPak  
Oplossingen voor het hele lichaam

## OPLOSSINGEN VOOR HET HELE LICHAAM

---

In de onderhoudsfase kan het onder controle houden van lymfoedeem een uitdaging zijn voor de patiënt en behandelaar. Als er sprake is van pitting oedeem dat zelden verdwijnt door hoog leggen met eventueel beginnende fibrose, dan kan een compressiehulpmiddel gedurende de nacht uitkomst bieden.

JOBST JoViPak producten bevatten foamdeeltjes van wisselende grootte die zorgen voor dynamische puntdrukken en zijn ontworpen om lymfevocht af te voeren en fibrotisch weefsel te verzachten. Het assortiment is zeer breed en bevat naast maatwerkproducten voor het hele lichaam, ook pads die overdag gedragen kunnen worden. JOBST JoViPak is inzetbaar vanaf ISL 2a\*.

Nachtcompressie geeft de beste resultaten wanneer het onderdeel is van het behandelplan, passend bij de gezamenlijk vastgestelde therapiedoelen. Dit vergroot de kans op een betere therapietrouw.

\* The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema: 2016 consensus document of the International Society of Lymphology



# COMPRESSIE WAAR DAT NODIG IS

## HOOFD, NEK EN KIN

### Confectie:

- Kinband standaard en uitgebreid
- Half- en volledig gezichts- en nekmasker
- Nekpads

(geen maatwerk beschikbaar)

## TORSO

### Maatwerk:

- Schouder-Thorax verband (met of zonder padding)
- Busti
- Vest
- JoViJacket voor extra compressie

### Confectie:

Pads borst en borstwand

## GENITAAL GEBIED

### Confectie:

- Genitale pads (zowel voor mannen als voor vrouwen)

(geen maatwerk beschikbaar)

## BOVENSTE LEDEMATEN

### Maatwerk:

- Armbandage - in één of twee delen
- JoViJacket voor extra compressie

(geen confectie beschikbaar)

## ONDERSTE LEDEMATEN

### Maatwerk:

- Beenbandage - hele been of onderbeen
- Hip Hugger
- Boxer Short
- JoViJacket voor extra compressie

(geen confectie beschikbaar)

*JOBST JoViPads en  
JOBST PitPaks kunnen  
overal op het lichaam  
worden gebruikt.*

# JOBST® JOVIPAK MATERIAALOPTIES

---

## JOVIPAK® STOFFEN

- **JoViPak Arm- en Beenbandage, Schouder-Thorax, Busti:** Polartec® Power Dry®, gemaakt van 100% polyester microvezelgarens. Polartec® Power Dry® draagt comfortabel dankzij de dempende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.
- **JoViJacket:** Powernet, gemaakt van nylon met spandex®, een sterk materiaal met beperkte rek.
- **JoViPak Hip hugger, Vest, en de Hoofd, nek- en kinverbanden:** gemaakt van 90% katoen en 10% Lycra®.

## JOVIPAK SCHUIM

- Bromidevrij
- Mengsel van twee tot vier soorten zeer veerkrachtig polyurethaan, onregelmatig van structuur en grootte
  - 2 blend foam: alleen in combinatie met Slimline kanalen
  - 4 blend foam: alleen in combinatie met Standaard kanalen

## KANALEN

- Standaard - ruim 3 cm tussen kanalen (4 blend foam)
- Slimline - 2,5 cm tussen kanalen (2 blend foam)  
(Meer kanalen met minder schuim, waardoor dunner)

## JOVIPAK ARMBANDAGE



### MAATWERK

#### Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor effectief (lymf)oedeemmanagement van de arm gedurende de nacht. De armbandage stimuleert de afvoer van lymfevocht en helpt fibrotisch weefsel te verzachten. De meerlaagse constructie zorgt voor stabiliteit die huidplooiën helpt overbruggen en zorgt voor stevigheid. De JoViPak armbandage is een duurzaam compressieproduct en kan bij zorgvuldig gebruik lang meegaan. Combineer voor optimale compressie de armbandage altijd met een JoViJacket.

#### Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:


**Kanalen:** Standaard of Slimline

**Opties:** Armbandage in één of twee delen, rits, gestikte vingers.

Arm					
AC1	AD	AE	AG	AG1	CG1

Materiaal	Polartec® Power Dry®			
<b>Kleur</b>	Black		Royal Blue	
	Buff		Plum	
	Pink			

## JOVIJACKET ARMBANDAGE

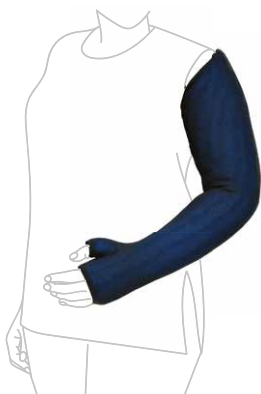

### MAATWERK

#### Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor extra compressie bij de JoViPak Armbandage. Vervang de JoViJacket na 6 maanden om optimale druk te behouden.

#### Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

In één of twee delen, afhankelijk van de armbandage.

Materiaal	Powernet		
<b>Kleur</b>	Black		White

## KINBAND STANDAARD



### CONFECTIE:

#### Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem in de nek, onderkaak en de voorste/laterale delen van het gezicht. De kinband standaard bedekt gedeeltelijk de oren. Een open naad in de nek maakt het mogelijk een pad te plaatsen voor maximale therapeutische effectiviteit. Hoewel het precieze type pad afhankelijk is van de toestand van de patiënt, wordt aanbevolen voor deze kinband de JoViPak Nekpad Universeel te gebruiken.

#### Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L en XL

#### Noot:

*U kunt de bijpassende JoViPak Nekpad Universeel eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.*

Materiaal	Katoen/Lycra®
<b>Kleur</b>	Ivory 

## KINBAND UITGEBREID



### CONFECTIE:

#### Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem in de nek, onderkaak en de voorste/laterale delen van het gezicht. De kinband uitgebreid bedekt de oren, de zijkant van het gezicht en achter de oren. Een open naad in de nek maakt het mogelijk een pad te plaatsen voor maximale therapeutische effectiviteit. Hoewel het precieze type pad afhankelijk is van de toestand van de patiënt, wordt aanbevolen voor deze kinband de JoViPak Nekpad Peri Auricular te gebruiken.

#### Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L en XL

#### Noot:

*U kunt de bijpassende JoViPak Nekpad Peri Auricular eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.*

Materiaal	Katoen/Lycra®
<b>Kleur</b>	Ivory 

## NEKPAD UNIVERSEEL



### CONFECTIE:

De universele JoViPak Nekpad is ontwikkeld om te worden gebruikt met de standaard kinband en helpt bij het aanpakken van bilateraal en nekoedeem, bij zwelling van de nek voor de oren.

### Noot:

*Dit product kan niet los gebruikt worden.*

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Ivory	

## NEKPAD PERI AURICULAR



### CONFECTIE:


Bedekt nek plus voor- en achterkant oor. Ontwikkeld om te worden gebruikt met de verlengde kinband of het gezichtsmasker. Deze pad heeft extensies voor zowel de voorste als de achterste delen van de oren en helpt bij het verminderen van bilateraal hoofd- en nekoedeem.

### Noot:

*Dit product kan niet los gebruikt worden.*

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Ivory	

## GEZICHTS- EN NEKMASKER

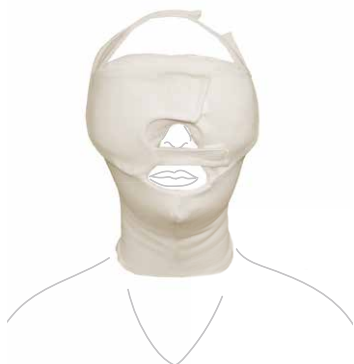

### CONFECTIE:

#### Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem in de nek, onderkaak en de zijkanten van het gezicht. Het masker bedekt het hele gezicht, behalve de neus en de mond. Met klittenband aan de boven- en achterkant van het hoofd, bij de nek en boven de bovenlip. Met behulp van een oogpad kan extra druk rond de ogen gecreëerd worden. De verstelbare band langs de bovenste helft van het gezicht zorgt voor volledig zicht wanneer dat nodig is. Een open naad in de nek maakt het mogelijk een pad te plaatsen voor maximale therapeutische effectiviteit. Hoewel het precieze type pad afhankelijk is van de toestand van de patiënt, wordt aanbevolen voor dit masker de JoViPak Nekpad Peri Auricular te gebruiken.

#### Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L en XL

#### Noot:

*U kunt de bijpassende JoViPak Nekpad Peri Auricular en Oogpad eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.*

Materiaal	Katoen/Lycra®
<b>Kleur</b>	Ivory 

## HALF GEZICHTS- EN NEKMASKER INCLUSIEF PADDING RECHTS



### CONFECTIE:

#### Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem in de nek, onderkaak en de zijkant van het gezicht. Het masker bedekt de wangen, oog en voorhoofd. Het klittenband bij de nek en aan de boven- en achterkant van het hoofd kan worden aangepast naar wens van de patiënt, waardoor het masker ook 's nachts kan worden gedragen. Het met versnipperde foam gevulde masker met gestikt patroon creëert wisselende puntdrukken.

#### Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L en XL

#### Noot:

*Dit product kan niet gecombineerd worden met een JoViPak Nekpad.*

Materiaal	Katoen/Lycra®
<b>Kleur</b>	Ivory 



## HALF GEZICHTS- EN NEKMASKER INCLUSIEF PADDING LINKS



### CONFECTIE:

#### Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem in de nek, onderkaak en de zijkant van het gezicht. Het bedekt de wangen, oog en voorhoofd. Het klittenband bij de nek en aan de boven- en achterkant van het hoofd kan worden aangepast naar wens van de patiënt, waardoor het masker ook 's nachts kan worden gedragen. Het met versnipperde foam gevulde masker met gestikt patroon creëert wisselende puntdrukken.

#### Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L en XL

#### Noot:

*Dit product kan niet gecombineerd worden met een JoViPak Nekpad.*

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Ivory	

## OOGPAD (+ BAND)



### CONFECTIE:

De JoViPak Oogpad is ontworpen om bilaterale druk te geven op het orbitale gebied van het gezicht. De Oogpad kan zowel op zichzelf als gecombineerd met het gezichts- en nekmasker gedragen worden.

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Ivory	

## JOVIPAK SCHOUDER-THORAX LINKS/RECHTS



Schouder-Thorax met thoraxpadding



Schouder-Thorax zonder thoraxpadding

### MAATWERK:

#### Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor patiënten die een mastectomie of lumpectomie hebben ondergaan en naast armoedeem ook oedeem rondom de schouder en/of het bovenlichaam hebben. De JoViPak Schouder-Thorax heeft drie ritsen om hem eenvoudiger aan te kunnen trekken: een middenvoor-thoracale rits, een onderarmrits, van pols naar elleboog en een rits over de rug van het aparte handstuk.






#### Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

Type: Mastectomie, Lumpectomie, Reconstructie.

Kanalen: Standaard of Slimline, horizontaal of verticaal.

Opties: Met of zonder thoraxpadding, armbandage in één of twee delen, armsling, rits, gestikte vingers.

U kunt de bijpassende JoViJacket Schouder-Thorax eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Polartec® Power Dry®	
<b>Kleur</b>	Black 	Royal Blue 
	Buff 	Plum 
	Pink 	

## JOVIJACKET SCHOUDER-THORAX



Schouder-Thorax met JoViJacket Voor extra compressie

#### Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij de JoViPak Schouder-Thorax, voor maximale pasvorm en effectiviteit. Vervang de JoViJacket na 6 maanden om optimale druk te behouden.

#### Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

In één of twee delen, afhankelijk van het Schouder-Thorax product.

Materiaal	Powernet	
<b>Kleur</b>	Black 	White 

## JOVIPAK BUSTI



### MAATWERK:

#### Wanneer inzetbaar:






Ontworpen voor patiënten die een lumpectomie hebben ondergaan en die oedeem of fibrose in de borst, borstwand en/of bovenrug hebben. De JoViPak Busti heeft een ritssluiting aan de voorkant. De Busti is minder geschikt voor patiënten met een cupmaat F of groter. In dat geval adviseren we om een Vest in te zetten.

*Voor patiënten die een mastectomie hebben ondergaan adviseren wij het JoViPak Vest met eventueel een P-PI pad voor de ontbrekende borst.*

#### Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

De Busti wordt altijd in Slimline uitvoering geleverd waardoor deze overdag kan worden gedragen.

U kunt de bijpassende JoViJacket Busti eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Polartec® Power Dry®	
<b>Kleur</b>	Black 	Royal Blue 
	Buff 	Plum 
	Pink 	

## JOVIJACKET BUSTI



### MAATWERK:

#### Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij de JoViPak Busti. Vervang de JoViJacket na 6 maanden om optimale druk te behouden.

Materiaal	Powernet	
<b>Kleur</b>	Black 	White 

## JOVIPAK VEST



### MAATWERK:

#### Wanneer inzetbaar:

Ontworpen om de afvoer van overtollig lymfevocht in de borst, laterale borstkas en bovenrug te vergemakkelijken na een lumpectomie, mastectomie en andere borst- of rompopperaties. De middensluiting is van klittenband in 2 delen (gesplitst bij de taille). Voor optimaal therapeutisch effect wordt aangeraden een JOBST JoViJacket over het Vest te dragen. Het Vest kan doorlopen tot de rand van het bekken als de patiënt een natuurlijke taille heeft (kleinere omtrek bij de taille dan bij de heup). Als de patiënt geen natuurlijke taille heeft, dan wordt een Vest tot de onderste rib aangeraden.

#### Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

**Kanalen:** Standaard (met 4 soorten schuim) of Slimline (met 2 soorten schuim); verticaal of horizontaal.

**Opties:** Halve of volledige vulling, rits, kortere versie (tot de taille).

U kunt de bijpassende JoViJacket Vest eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Black	<input checked="" type="checkbox"/>	Ivory <input type="checkbox"/>

## JOVIJACKET VEST



### MAATWERK:

#### Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij het JoViPak Vest, voor maximale pasvorm en effectiviteit. Vervang de JoViJacket na 6 maanden om optimale druk te behouden.


Materiaal	Powernet		
Kleur	Black	<input checked="" type="checkbox"/>	White <input type="checkbox"/>

# BESTELADVIES JOVIPAK VEST

## CONTINUOUS FLOW-KANALEN

Voor een maximaal therapeutisch effect is het belangrijk om de kanalen in de juiste richting te plaatsen, passend bij de indicatie en de richting van mogelijke lymfe-afvoer.

### Kanaal opties

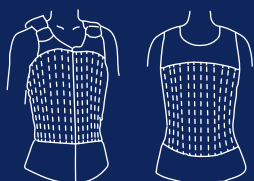


Voorkant

Achterkant

### BILATERAAL (DUBBELE VULLING)

Voor patiënten met een dubbele mastectomie of lumpectomie met weinig tot geen functionele lymfeklieren in beide oksels. Continuous flow-kanalen voeren vocht distaal af naar het verzamelgebied in de lies.

### Vulling opties

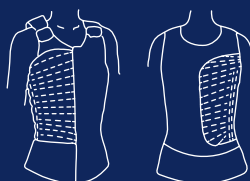

Voorkant

Achterkant

### 1/2 VULLING UNILATERAAL (HORIZONTALAAL OF VERTICAAL)

Voor patiënten die een unilaterale mastectomie of lumpectomie hebben ondergaan en borstwandfibrose aan één kant hebben. De foamvulling met Continuous flow-kanalen strekt zich tot over de verticale achter- en voorwaterscheidingen. U bestelt deze rechts- of linkszijdig.

## JOVIPAD BELISSE AXILLA MINI



### CONFECTIE:

#### Wanneer inzetbaar:


Voor extra compressie in de oksel. Een losjes gevulde pad met een verlengstuk dat de afvoer van lymfevocht stimuleert. De pad kan in combinatie met het JoViPak Vest, een compressiebeha of compressiehemd gebruikt worden. De pad voelt zacht aan tegen de huid en is comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

#### Beschikbaar in de volgende maten:

S (70-75cm), M (80-85cm), L (90-95cm) en XL (100-110cm)

#### Noot:

*Dit product kan niet los gebruikt worden.*

Materiaal	Katoen/Lycra®
Kleur	Buff 



## JOVIPAD POST-MASTECTOMY



### CONFECTIE:

#### Wanneer inzetbaar:

Voor patiënten die een mastectomie hebben ondergaan met borstwand-oedeem en/of stralingsfibrose over de voorste borstwand en de serratus anterior, maar met een normale lymfedrainage aan de niet-aangedane zijde. De pad bedekt de aangedane borstwand helemaal. Kan gebruikt worden onder een compressiehemd en is met name geschikt voor gebruik tijdens de nacht. De pad voelt zacht aan tegen de huid en is comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

#### Beschikbaar in de volgende maten:

S (70-75cm), M (80-85cm), L (90-95cm) en XL (100-110cm)

#### Noot:

*Dit product kan niet los gebruikt worden.*

Materiaal	Katoen/Lycra®
Kleur	Buff 



## JOVIPAD SERRATUS ANTERIOR



### CONFECTIE:

#### Wanneer inzetbaar:

Voor patiënten die een mastectomie hebben ondergaan met oedeem en/of stralingsfibrose op de borstwand. Om lymfevocht lateraal naar de liesklieren en posterior richting ruggengraat af te voeren. Past in de meeste mastectomie- of compressiehemden of prothesebeha's (onder de prothese) en is met name geschikt voor gebruik overdag. De pad voelt zacht aan tegen de huid en is comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

#### Beschikbaar in de volgende maten:

S (70-75cm), M (80-85cm), L (90-95cm) en XL (100-110cm)

#### Noot:

*Dit product kan niet los gebruikt worden.*

Materiaal	Katoen/Lycra®
Kleur	Buff 



## JOVIPAD POST-LUMPECTOMY



### CONFECTIE:

#### Wanneer inzetbaar:


Voor oedeem en/of stralingsfibrose van de aangedane borst en/of borstwand. De pad bedekt de aangedane borst volledig en strekt zich uit tot aan de wervelkolom. Past onder de meeste compressiehemden en is met name geschikt voor gebruik tijdens de nacht. De pad voelt zacht aan tegen de huid en is comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

#### Beschikbaar in de volgende maten:

Cupmaat:	Lengte van sternum tot ruggengraat:
Small vanaf cup A/B	Small lengte 46 cm
Medium vanaf cup C	Medium lengte 50 cm
Large vanaf cup D/DD	Large lengte 55 cm
XLarge vanaf cup E/F	XLarge lengte 66 cm

#### Noot:

*Dit product kan niet los gebruikt worden.*

Materiaal	Katoen/Lycra®
Kleur	Buff 



## JOVIPAD BELISSE INFRAMAMMARY



### CONFECTIE:

#### Wanneer inzetbaar:

Voor patiënten die een lumpectomie hebben ondergaan met oedeem en/of fibrose aan de onderzijde van de borst. De ellipsvormige pad loopt van de serratus anterior tot de processus xiphoideus en geeft zachte puntdruk-massage aan de onderzijde van de borst. De pad kan onder een compressiebeha gebruikt worden en is met name geschikt voor gebruik overdag. De pad voelt zacht aan tegen de huid en is comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

#### Beschikbaar in de volgende maten:

S (70-75cm), M (80-85cm), L (90-95cm) en XL (100-110cm)

#### Noot:

*Dit product kan niet los gebruikt worden.*

Materiaal	Katoen/Lycra®
Kleur	Buff 

## GENITAAL GEBIED

We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze afdeling Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager.

Deze JOBST JoViPads zijn ontworpen om comfort te bieden aan vrouwen en mannen die lijden aan oedeem en/of fibrose in de liesstreek, schaamlippen of het scrotum. De met versnipperde foam gevulde pads met gestikt patroon creëren wisselende puntdrukken bij gebruik onder compressiekleding. De pads zijn ontworpen om de afvoer van lymfevocht te stimuleren en fibrotisch weefsel te verzachten.

### JOVIPAD GENITALE VROUW



#### CONFECTIE:

##### Wanneer inzetbaar:

De JoViPad Genitale Vrouw is ontworpen om oedeem en/of fibrose in de schaamlippen en/of de liezen te helpen verminderen. De voorzijde is ontworpen om tegelijkertijd een hysterectomielitteken te kunnen bedekken. De pad heeft elastiek aan de zijkanten zodat deze makkelijk op zijn plaats blijft zitten. De pad wordt bij voorkeur direct op de huid gedragen.

##### Beschikbaar in de volgende maten (broekmaat):

S (34-38), M (40-42), L (44-46) en XL (48-52)

##### Noot:

*Voor een maximaal resultaat moet dit product worden gecombineerd met een compressiebroek.*

Materiaal	Katoen/Lycra®
Kleur	Buff 

### JOVIPAD GENITALE MAN



#### CONFECTIE:

##### Wanneer inzetbaar:


De JoViPad Genitale Man is ontworpen om oedeem en/of fibrose in het scrotum en/of de liezen te helpen verminderen. De pad heeft elastiek aan de zijkanten zodat deze makkelijk op zijn plaats blijft zitten. De pad wordt bij voorkeur direct op de huid gedragen.

##### Beschikbaar in de volgende maten (omtrek scrotum):

S (28cm), M (36 cm), L (42cm) en XL (52cm)

##### Noot:

*Voor een maximaal resultaat moet dit product worden gecombineerd met een compressiebroek.*

Materiaal	Katoen/Lycra®
Kleur	Buff 



## ONDERSTE LEDEMATEN

We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze afdeling Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager.

### JOVIPAK BEENBANDAGE



#### MAATWERK:

#### Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor effectief (lymf)oedeemmanagement van het been gedurende de nacht. De beenbandage stimuleert de afvoer van lymfevocht en helpt fibrotisch weefsel te verzachten. De meerlaagse constructie zorgt voor stabiliteit die huidplooiën helpt overbruggen en zorgt voor stevigheid.

Een JoViPak beenbandage is een duurzaam compressieproduct en kan bij zorgvuldig gebruik lang meegaan. Combineer voor optimale compressie de beenbandage altijd met een JoViJacket.

#### Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

4 blend, standaard kanalen.

**Opties:** Tot de tenen, rits.

U kunt de bijpassende JoViJacket Been eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Been					
AB1	AD	AF1	AG	AG1	DG1

Materiaal	Polartec® Power Dry®			
<b>Kleur</b>	Black		Royal Blue	
	Buff		Plum	
	Pink			

### JOVIJACKET BEENBANDAGE



#### MAATWERK:

#### Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij de JoViPak Beenbandage, met antislipzool. Vervang de JoViJacket na 6 maanden om optimale druk te behouden.

Materiaal	Powernet			
<b>Kleur</b>	Black		White	

## JOVIPAK BOXER



### MAATWERK:

#### Wanneer inzetbaar:






Voor patiënten met heup-, gluteaal of genitaal oedeem. De JoViPak Boxer kan met een JoViPak Beenbandage of JOBST Relax gecombineerd worden.

Ontworpen om de afvoer van lymfevocht en verzachting van fibrotisch weefsel te stimuleren. Combineer voor maximaal resultaat de JoViPak Boxer met een JoViJacket.

#### Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

4 blend, standaard kanalen.

U kunt de bijpassende JoViJacket Boxer eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Polartec® Power Dry®		
<b>Kleur</b>	Black 	Royal Blue 	
	Buff 	Plum 	
	Pink 		

## JOVIJACKET BOXER



### MAATWERK:

#### Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij de JoViPak Boxer, al dan niet in combinatie met een beenbandage. Vervang de JoViJacket na 6 maanden om optimale druk te behouden.

Materiaal	Powernet	
<b>Kleur</b>	Black 	White 

## JOVIPAK HIP HUGGER



### MAATWERK:

#### Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor patiënten die hoog op het been tot in de heup oedeem hebben, om de afvoer van lymfevocht en verzachting van fibrotisch weefsel te stimuleren. Comfortabel dankzij het polsterend effect. De JoViPak Hip Hugger kan met een JoViPak Beenbandage of JOBST Relax gecombineerd worden (onderbeen).

#### Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

4 blend, standaard kanalen.

Materiaal	Katoen/Lycra®	
Kleur	Black <input checked="" type="checkbox"/>	Ivory <input type="checkbox"/>

## JOVIJACKET DG




### MAATWERK:

#### Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij de JoViPak Hiphugger. Vervang de JoViJacket na 6 maanden om optimale druk te behouden.

Materiaal	Powernet	
Kleur	Black <input checked="" type="checkbox"/>	White <input type="checkbox"/>

## AANTREKHULP (DYCEM ANTI-SLIP MAT)

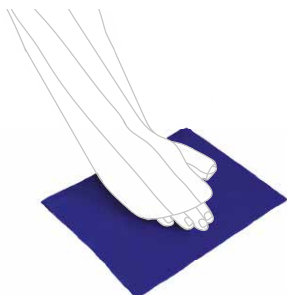


#### Wanneer inzetbaar:

Als hulpmiddel voor het aantrekken van een JoViPak arm- of beenbandage.

*De JoViPak Aantrekhelp wordt NIET vergoed.*

## JOVIPAD FOAM POP

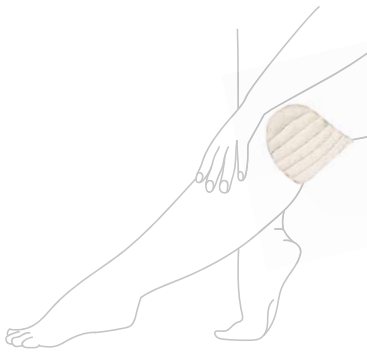

### CONFECTIE:

#### Wanneer inzetbaar:

De JoViPad Foam POP is ontworpen om lokaal druk te verhogen bij patiënten met lymfoedeem, andere vormen van oedeem en/of fibrose. Deze ovale pad is geschikt voor gebruik in de gevoelige knieholte of voorzijde van de enkel. De pad is ook geïndiceerd voor patiënten die lokaal druk nodig hebben bijvoorbeeld op de voetrug of andere kleine gebieden met fibrose.

#### Beschikbaar in de volgende maten:

Eén maat: 12,5 x 20 cm

#### Noot:

*Voor een maximaal resultaat moet dit product worden gecombineerd met een compressiehulpmiddel.*

Materiaal	Katoen/Lycra®
Kleur	Buff 

## JOVIPAD FOAM KDNY



### CONFECTIE:

#### Wanneer inzetbaar:

De JoViPad Foam KDNY is ontworpen om lokaal druk te verhogen bij patiënten met lymfoedeem, andere vormen van oedeem en/of fibrose. Deze niervormige pad is geschikt voor gebruik in gebieden zoals de laterale borst ter hoogte van de oksel, de distale voorzijde van de knie, de binnenkant van het bovenbeen ter hoogte van de lies of de bovenzijde van het pubisgebied.

#### Beschikbaar in de volgende maten:

Klein (7.5 x 16), Middelgroot (12.5 x 25) en Groot (17 x 33)

#### Noot:

*Voor een maximaal resultaat moet dit product worden gecombineerd met een compressiehulpmiddel.*

Materiaal	Katoen/Lycra®
Kleur	Buff 

## PITPAKS

We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze afdeling Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager.

JOBST PitPaks zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van hardnekkige, langdurige fibrose of lipodermatosclerose. De PitPaks zijn gevuld met een speciale pitvulling die stevige massage van het aangedane gebied mogelijk maken. JOBST PitPaks zijn harder dan foampads en daarom wordt geadviseerd deze pads alleen onder toezicht van een therapeut te gebruiken. Begin met een toepassing van 15 minuten (maximaal) onder lichte compressie of in combinatie met massage om de tolerantie te beoordelen. Bouw de toepassingstijd op op basis van tolerantie.

### PITPAK CILINDER - VOLLEDIGE VULLING



#### Beschikbaar in de volgende maten:

SR-CYL-FP D6:	lengte 15 cm omvang 18 - 23 cm
SR-CYL-FP D6.5:	lengte 16,5 cm omvang 23 - 30,5 cm
SR-CYL-FP D8:	lengte 20,5 cm omvang 28 - 38 cm
SR-CYL-FP D9:	lengte 23 cm omvang 35,5 - 43 cm

Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten	
Kleur	Buff	

### PITPAK CILINDER - HALVE VULLING




#### Beschikbaar in de volgende maten:

SR-CYL-HP D7.5:	lengte 19 cm omvang 18 -25,5 cm
SR-CYL-HP D8.5:	lengte 21,5 cm omvang 20,5 - 30,5 cm

Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten	
Kleur	Buff	

### PITPAK BASISVORM - ROND

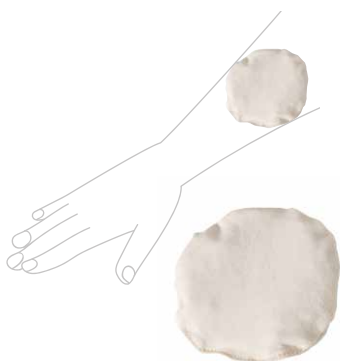

#### Beschikbaar in de volgende maat:

RND 6: rond PitPak zonder kanalen, diameter 15 cm

Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten	
Kleur	Buff	

## PITPAK BASISVORM - RECHTHOEKIG



**Beschikbaar in de volgende maat:**

SR-REC-FP 6 x 9: rechthoek 15 x 23 cm

Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten	
Kleur	Buff	

## PITPAK HALVEMAANVERBAND



**Beschikbaar in de volgende maten:**

Inframammary Pak (IMP):

Small = 21,5 x 9 cm

Medium = 25,5 x 10 cm

Large = 28 x 12 cm

Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten	
Kleur	Buff	

## PITPAK HANDPAKKING



**Beschikbaar in de volgende maat:**

DRSM 4 x 5: anatomisch gevormde PitPak met 3 compartimenten

Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten	
Kleur	Buff	

## BESTELINFORMATIE

---

U kunt de bestel- en receptformulieren voor de verschillende JOBST JoViPak producten op [jobst.nl](http://jobst.nl) vinden. Voor uw gemak is alle benodigde informatie hierin opgenomen. Sommige bestelformulieren bevatten meerdere pagina's. Ook bevatten de formulieren informatie om de juiste maat te helpen bepalen.

In verband met de aard van maatwerkproducten is het niet mogelijk om deze achteraf aan te passen. Confectieproducten mogen alleen in de originele plastic verpakking gepast worden en eventueel omgeruild. Aangebroken verpakkingen worden niet retour genomen. Heeft u hulp nodig met uw bestelling? Neem dan vooral contact met ons op.

Voor informatie en bestellingen kunt u terecht op [jobst.cs.nl@essity.com](mailto:jobst.cs.nl@essity.com) of telefoonnummer 030 - 69 84 700.



Ga direct naar de  
downloadpagina

